

Mascarilla FFP2

REF: 0017N CE 0161

Descripción

Este EPI de Categoría III ha sido fabricado de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425, para uso básico, EN 149:2001+A1:2009 Dispositivos de protección respiratoria. Media máscara filtrante para proteger contra partículas. Requisitos, pruebas, marcado, de conformidad con certificado emitido por AITEX, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoy, España, Organismo Notificado 0161

El EPI se fabrica en un material no tejido con: 1 capa de Spunbond + 1 capa de Hot air cotton + 2 capas de filtro Meltblow + 1 capa de Spunbond para FFP2

Características

- Pieza facial ajustable.
- Por su capacidad de filtrado está indicado para la protección respiratoria de profesionales sanitarios o personas expuestas a riesgo.
- La forma convexa, el diseño de doble elástico, protector y clip nasal aseguran un uso cómodo adaptándose a distintos rasgos faciales.
- La mascarilla dispone de un plegado vertical para un mayor confort y protección.
- Limitación de uso: un turno de trabajo 8 h o hasta que se observe algún deterioro durante el uso.

Uso Recomendado

Utilizada correctamente proporciona un nivel aceptable de protección frente a la inhalación de partículas. Las mascarillas son recomendadas para problemas de virus, alergia, contaminación, contagios, olores desagradables, Sensibilidad Múltiple Química, Oncología, y en general a personas que precisen protección de sus vías respiratorias. No deben reutilizarse.

Información adicional

- Embalaje: 10 unds en un envase individual e higiénico
- Eficacia Filtración Mínima: 95%
- Libre de fibra de vidrio
- Libre de grafito
- Medidas: 210 x 155mm
- Inhalación: 30l/min: 0,7 mbar - 95l/min: 2,4 mbar
- No estéril
- 100% Polipropileno
- Libre de látex
- Resistencia máxima:
- Exhalación: 160l/min: 3,0 mbar

Desecho del producto Los productos contaminados deben desecharse atendiendo a la legislación local para desechos peligrosos.

Almacenamiento y transporte

Las mascarillas tienen una caducidad de 5 años antes de su uso. La fecha de caducidad está marcada en la caja del producto. Antes del uso, compruebe que el producto está dentro de su periodo de uso. El producto debe almacenarse en ambiente limpio y seco, en un rango de temperatura de 10°C a 30°C y humedad relativa < 80%. Utilice el embalaje original para transportarlo.



Caducidad: 5 años



Temperatura de almacenamiento
+30° a -20° ambiente
limpio y seco



Humedad: 80%

Instrucciones de uso



1. Desinfectarse las manos.
2. Con el dorso de la mascarilla hacia arriba, desplegar y abrir.
3. Coloque la mascarilla por debajo de la barbilla, con el clip nasal hacia arriba y tirar de los elásticos hasta colocarlos sobre las orejas.
4. Presionar el clip de la parte superior sobre la nariz hasta obtener un ajuste perfecto sobre ella ajustando la mascarilla en general hasta obtener un buen ajuste y protección. El ajuste debe abarcar la boca y nariz en su totalidad.

Composición 5 capas

